



A PARCOURIR AVANT DE COMMENCER ...

Énu-réveil sans fil "CONTESSA"

Le set complet comprend:

- Le récepteur (le réveil lui-même) : un boîtier blanc muni d'un autocollant sur la partie supérieure
- Le petit émetteur (à fixer sur la petite culotte) : un boîtier vert doté de 2 boutons
- L'alimentation secteur avec transformateur
- La/les petite(s) culotte(s) (le nombre que vous avez commandé)
- Le mode d'emploi et les prescriptions de lavage

Comment débiter ?

Connectez le réveil au réseau électrique en branchant le transformateur. Insérez la fiche appropriée dans le réveil (à l'arrière de l'appareil) et branchez la fiche dans une prise de la chambre de l'enfant.

Le voyant rouge s'allume. L'appareil doit rester branché au réseau électrique tout le temps que l'énu-réveil doit être en fonction. Nous vous conseillons de débrancher l'appareil pendant la journée.

L'émetteur (boîtier vert) est prêt à l'emploi. Il contient deux petites piles (de type 2032).

TEST : branchez le réveil au réseau électrique (voir ci-dessus). Mettez en contact les 2 petits boutons de l'émetteur en les reliant avec un morceau de tissu légèrement humidifié ou avec un objet métallique (des ciseaux, par exemple). L'alarme doit s'activer immédiatement.

Les petites culottes

Veillez suivre les instructions de lavage qui ont été annexées séparément. N'oubliez pas de laver les petites culottes, de préférence en machine (programme complet, température de maximum 50°) avant le premier usage. Elles seront ainsi plus absorbantes et l'alarme se déclenchera dès que l'enfant COMMENCE à uriner (ce qui est bien évidemment le but).

Instructions pour l'entretien durant l'entraînement : rincez quotidiennement les petites culottes à l'eau tiède (à la main; ne les lavez pas tous les jours à la machine !!). N'utilisez pas trop de poudre à laver ou d'adoucissant car cela risquerait d'isoler le câblage des petites culottes voire de le rendre gras, ce qui rendrait le contact difficile voire inexistant. Si vous utilisez de la lessive liquide, choisissez un produit sans agent de blanchiment, comme Dreft.

Nous vous déconseillons d'utiliser l'essoreuse et le sèche-linge. Pour sécher la petite culotte, il vaut mieux la presser dans une serviette éponge, puis de la laisser sécher à plat ou suspendue. N'utilisez surtout pas de sèche-cheveux ni de fer à repasser, ni quelque source de chaleur élevée que ce soit !

Si nécessaire, le sèche-linge peut être utilisé à la température la plus basse. Rincez la petite culotte après chaque usage (tous les matins), même si l'enfant n'a pas eu d'accident nocturne !

CONSEIL : si votre enfant a tendance à transpirer ou transpire abondamment – ce qui risque de déclencher l'alarme – vous pouvez pallier ce problème en :

- passant la petite culotte munie du détecteur d'urine PAR-DESSUS une petite culotte ordinaire
- saupoudrant la peau d'un peu de talc avant d'enfiler la petite culotte
- évitant de faire porter un pyjama chaud, un peignoir etc. à l'enfant lorsqu'il dort.

Le réveil a une portée d'environ 8 mètres. Le récepteur doit donc être placé dans ce périmètre dans la chambre de l'enfant.

Vous possédez un babyphone ou d'autres appareils sans fil chez vous ? Vérifiez s'il n'y a pas d'interférence lorsque les deux appareils sont utilisés simultanément. Si c'est le cas, changez la fréquence de l'installation ou de l'appareil qui produit les interférences. Le routeur d'une connexion internet sans fil peut aussi perturber l'émetteur ! (Emetteur Urifoon = 433 Mhz)

TEST : si vous voulez vérifier que la petite culotte fonctionne correctement, n'utilisez pas d'eau froide. Prenez un demi-verre d'eau tiède et faites-y dissoudre, en mélangeant bien, une petite cuillère à café rase de sel fin de cuisine. Laissez tomber quelques gouttes de cette solution sur la petite culotte prélavée, pendant que le réveil est branché et prêt à l'emploi. L'alarme doit se déclencher.

Maniement du réveil :

- Faites enfiler à l'enfant une petite culotte prélavée et bien sèche. L'émetteur vert doit se trouver à l'avant du corps (sur le ventre).
- Enclenchez correctement l'émetteur en pressant les boutons (**CONSEIL** : *si votre enfant est remuant ou a le sommeil agité, il peut arriver que l'émetteur se détache durant la nuit. Dans ce cas, faites enfiler un sous-vêtement ordinaire PAR-DESSUS la petite culotte munie du détecteur d'urine*)
- Branchez le récepteur (le réveil) et placez-le dans un rayon de 5 mètres autour du lit.
- Lorsque l'alarme se déclenche, l'enfant doit se lever et **D'ABORD DÉTACHER L'ÉMETTEUR VERT DE LA PETITE CULOTTE (débranchement du signal) PUIS ENSUITE DONNER UNE TAPE À L'AIDE DE DEUX DOIGTS SUR L'AUTOCOLLANT APOSÉ SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'APPAREIL. CE N'EST QU'À CE MOMENT QUE L'ALARME S'ARRÊTERA.** L'enfant doit bien entendu toujours passer immédiatement à la toilette pour vider sa vessie de façon correcte. SEUL l'enfant peut éteindre l'alarme, et non le parent ou l'accompagnateur ! Vous pouvez "aider l'enfant à se réveiller", mais c'est à lui de manipuler le réveil !
- **CONSEIL** : *n'éteignez JAMAIS le réveil en retirant l'adaptateur de la prise pour couper l'alarme. Ne laissez JAMAIS non plus l'émetteur dans une culotte mouillée : les piles se videraient !*
- Après le passage à la toilette, faites enfiler une nouvelle petite culotte (prélavée et bien sèche), enclenchez l'émetteur vert et l'enfant peut retourner au lit. **CONSEIL** : *Pour les garçons : assurez-vous que le pénis soit bien sec après le passage à la toilette. Quelques gouttes d'urine sur le slip sec réactiveront immédiatement l'alarme. Un slip déjà porté ne peut être réutilisé immédiatement puisque s'il n'est pas tout à fait sec ou qu'il entre en contact avec de l'humidité, l'alarme se déclenchera !!*

L'alarme ne se déclenche pas ! Quelle peut en être la cause ?

- Contrôlez si la distance entre l'alarme et l'émetteur (l'emplacement du lit) n'est pas trop grande.
- La petite culotte est-elle suffisamment absorbante ?
- La petite culotte est-elle usée par une utilisation prolongée ?
- L'émetteur fonctionne-t-il encore ? Les piles sont-elles plates ?
- Est-ce que tout est bien connecté et branché ?

ÉMETTEUR (boîtier vert)

Fonctionne sur deux piles bouton CR 2032, qui sont fournies et déjà montées. Vous pouvez les remplacer vous-même si nécessaire en ouvrant prudemment l'émetteur : insérez un objet plat, pas trop acéré (comme un petit tournevis ou une pièce de monnaie) dans l'un des coins de la fermeture noire, et faites-la basculer légèrement jusqu'à ce que le petit couvercle se détache. Vous pouvez retirer les piles en toute sécurité et les remplacer par de nouvelles, en les plaçant dans la même position. Réapposez le couvercle d'obturation, en utilisant si nécessaire un peu de vaseline (pour bien isoler le tout). En effet, toute humidité parvenant à l'émetteur peut être néfaste et en perturbera le fonctionnement.

En cas de doutes ou de problèmes, contactez-nous. Nous avons notre propre service d'entretien et de réparation.

Cet appareil est représenté et vous a été loué par

CHARCO / P-SHOP
Kortrijksesteenweg 425
B 9000 GENT

HELP DESK : tél. ++ 32 (0)9 220 68 94 fax ++ 32 (0)9 245 58 46

www.charco.be
info@charco.be

GARANTIE

Charco accorde une garantie de deux ans sur l'appareil, pour un usage normal et à condition que les prescriptions d'utilisation aient été respectées.

LOCATION

Le réveil, l'émetteur et le transformateur de courant vous ont été fournis en location. Les conditions générales et particulières de la convention de location y sont applicables. À la fin du traitement, vous êtes tenu de tout restituer (par la poste ou en personne) au magasin 'De Plaswinkel', à l'exception des petites culottes. Les petites culottes fournies ne sont pas reprises pour des raisons d'hygiène. **ATTENTION !** S'il manque l'émetteur ou le transformateur, ou que l'un d'eux est défectueux, 60,00 euros seront portés en compte !